


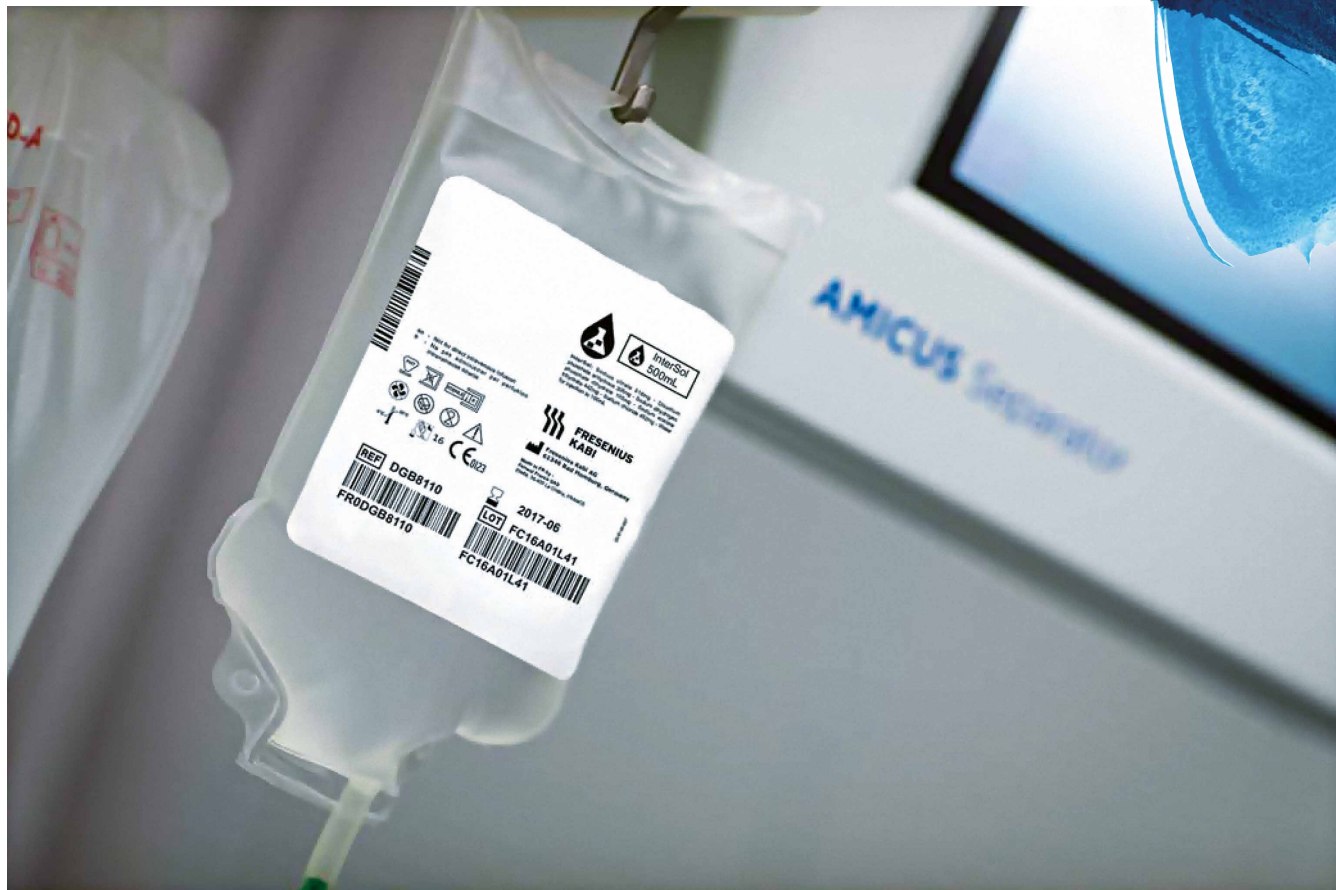

Solução InterSol®

Solução Aditiva para Plaquetas

A Solução Aditiva para Plaquetas InterSol® é um meio que substitui uma porção do plasma utilizado para armazenar plaquetas coletadas com o Separador Celular Amicus®.

As plaquetas armazenadas na Solução InterSol® contêm aproximadamente 65% menos plasma do que as plaquetas convencionais, resultando em títulos de anticorpos anti-A e anti-B significativamente mais baixos e com menores especificidades HLA^{1,2}, em comparação com plaquetas armazenadas em 100% de plasma.

O plasma substituído pela Solução InterSol® pode ser coletado para utilização em transfusões. A Solução InterSol® deve ser usada como solução de armazenamento para concentrados de plaquetas, não para infusão intravenosa direta.

Plaquetas armazenadas em Solução InterSol®:

Contêm aproximadamente 65% menos plasma, resultando em títulos de anticorpos anti-A e anti-B mais baixos e menores especificidades HLA

Adição da Solução InterSol® durante a etapa de Coleta das Plaquetas por Aférese sem necessidade de processamentos adicionais

São preparadas e manuseadas como plaquetas convencionais


Solução InterSol® Solução Aditiva para Plaquetas

Prepare concentrados de plaquetas por aférese com ~65% menos plasma.


A Solução InterSol® proporciona as condições apropriadas para o armazenamento das plaquetas, substituindo uma porção do plasma.

Além disso, substitui uma porção do plasma de concentrados de plaquetas coletados com o Separador Celular Amicus®.

Plaquetas em Solução InterSol®

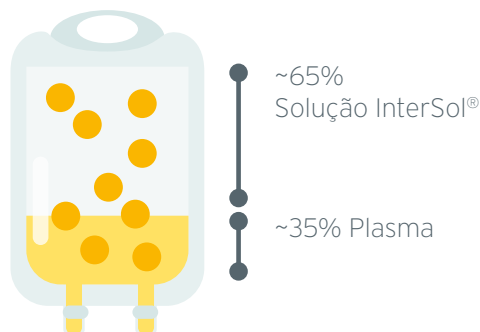

Plaquetas em 100% Plasma

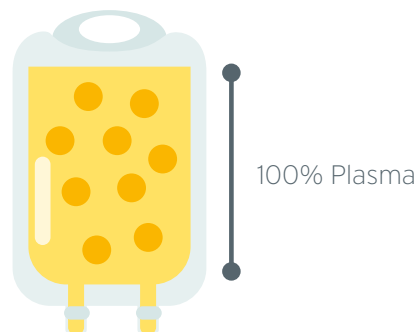

A dose de plaquetas e o volume total de fluido permanecem inalterados.

As plaquetas coletadas no Separador Amicus® e armazenadas em Solução InterSol® atendem aos requisitos da FDA para a recuperação e manutenção de plaquetas in vivo.

A Solução InterSol® é composta por substâncias comuns em uso médico.

Formulação	(mg/100mL)
Fosfato de Sódio Di básico, Anidro, USP	305
Fosfato de Sódio Monobásico, Di hidratado, USP	105
Citrato de Sódio, Di hidratado, USP	318
Acetato de Sódio, Tri hidratado, USP	442
Cloreto de Sódio, USP	452
Água para injeção, USP	QSP

Consulte as Instruções de Uso e o Manual do Operador para obter uma lista completa de advertências e precauções associadas ao uso desses produtos.

Copyright© 2021 Fresenius Kabi AG. Todos os direitos reservados.

As marcas registradas mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Solução InterSol® Reg. ANVISA: 10077090150
Separador Amicus® Reg. ANVISA: 10077090144

